



PAROWANIE URZĄDZENIA SAMARITAN TRAINER Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot dołączony do urządzenia Samaritan Trainer nie działa na podczerwień tak jak to ma miejsce w przypadku typowych urządzeń zdalnego sterowania. Urządzenie wraz z pilotem są ze sobą sparowane i dostrajane do urządzeń przez rozpoznawanie ich identyfikatorów (ID), co pozwala na używanie dwóch urządzeń obok siebie. W związku z tym każdorazowe wyjęcie baterii a więc zerwanie tego połączenia powoduje konieczność ponownego sparowania urządzeń. Aby sparować urządzenia działaj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotuj kabel USB dedykowany dla Urządzenia Samaritan Trainer i podłącz go do komputera.
2. Uruchom program Universal Trainer Configurator. Jeśli nie masz programu możesz bezpłatnie pobrać go i zainstalować:
http://heartsinelive.s3.amazonaws.com/uploads/2015/06/TrainerConfigTool_setu.p.exe
3. Przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego Universal Trainer, należy włączyć funkcję Dostrajania urządzeń sterujących.
4. Odłącz kabel USB i WŁĄCZ urządzenie używając ZIELONEGO wyłącznika głównego (ON/OFF). Diody wskaźnikowe zostaną podświetlone, co oznacza tryb dostrajania.
5. Przytrzymując CZERWONY WYŁĄCZNIK pilota zdejmij pokrywę baterii pilota, a baterie wymień na nowe. Po wymianie baterii pilot zdalnego sterowania dostroi się do urządzenia. Po pomyślnym dostrojeniu urządzenie wyemituje 12 sygnałów dźwiękowych. Po pierwszych sygnałach dźwiękowych, należy przestać naciskać WYŁĄCZNIK i ponownie założyć osłonę baterii.
6. Kiedy urządzenie zakończy wydawanie sygnałów dźwiękowych, należy ponownie nacisnąć CZERWONY WYŁĄCZNIK na pilocie. Urządzenie Samaritan Trainer WYŁĄCZY się. Dla pewności włącz urządzenie zielonym przyciskiem i naciśnij dowolny przycisk scenariusza aby sprawdzić czy pilot działa prawidłowo.