

Instrukcja Obsługi

Przeznaczony do użytku pod nadzorem instruktorów BHP.

Każdy zestaw zawiera 10 zielonych zatyczek z pianki dla początkujących i 20 żółtych dla bardziej zaawansowanych uczniów.

Zatyczki można zmiękczyć, gniotąc palcami. W razie potrzeby pozwala to na łatwiejsze wydalenie ich z trenera.


Naciągnij kamizelkę na głowę i dopasuj ramiączka oraz pas, aby dobrze przylegały.

Włóż zatyczkę do rurki symbolizującej drogi oddechowe.



Rozmiar tych zatyczek jest typowy dla zagrożenia dławieniem – zapewniając realistyczne szkolenie, ale należy je trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 4 roku życia.

Umieść dłonie w prawidłowej pozycji, między pępkiem a klatką piersiową, delikatnie opierając je o kamizelkę.

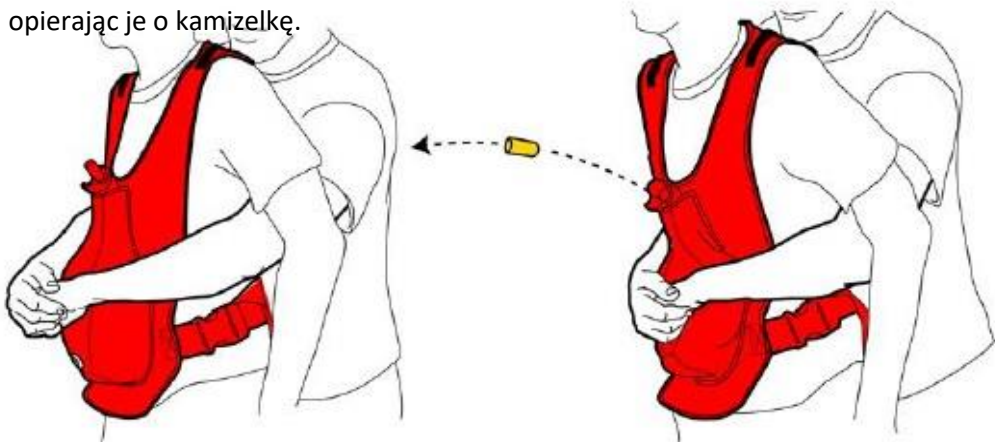

Następnie wykonaj szybki ruch w górę, aby usunąć zatyczkę. **Nie używaj siły, nie jest to konieczne i może spowodować obrażenia.** Prawidłowy ruch spowoduje wystrzelenie zatyczki, zapewniając natychmiastową informację zwrotną. **Uwaga: nie celuj zatyczką w oczy!**

Użyj podkładki z tyłu kamizelki, aby poćwiczyć uderzenia w plecy.


UWAGA: tylko do symulacji, nie używaj siły.



Kamizelki treningowej można używać w różnych pozycjach do tworzenia realistycznych scenariuszy, w tym: stania, siedzenia i leżenia na ziemi. Pozwala także uczniowi ćwiczyć samoratownictwo przy użyciu biału lub krzesła.

Czyszczenie

Od spodu kamizelki odepnij rzepy i wyjmij pęcherz PVC oraz imitację dróg oddechowych.

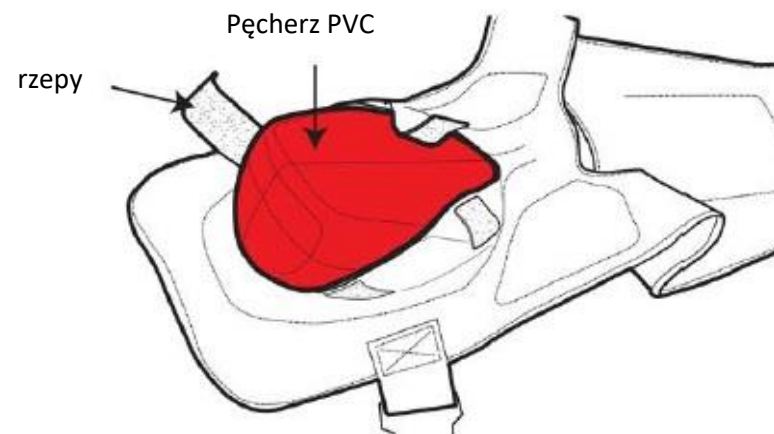

Kamizelkę należy umyć ręcznie, używając łagodnego detergentu, zawiesić do wyschnięcia.