



KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY W RÓŻNYCH
ROZMIARACH

NEC UP

CECHY

- Dostępny w dwóch wersjach dostosowanych do różnych grup wiekowych: model dla dorosłych można regulować w 4 rozmiarach, natomiast model pediatryczny pasuje na 3 rozmiary
- Łatwy i szybki w zakładaniu dzięki wbudowanemu zapięciu na pasek
- Otwór na tracheotomię oraz otwór w części karkowej poprawiają wentylację i ułatwiają kontrolę medyczną
- Czerwone oznaczenie widoczne z przodu wskazuje wybraną rozmiar
- Łatwy do prania i dezynfekcji, o kompaktowej konstrukcji ułatwiającej przechowywanie
- Umożliwia wstępną diagnostykę za pomocą promieni rentgenowskich.



Wyrób medyczny klasy I zgodny z rozporządzeniem UE 2017/745 – MDR

PRZEZNACZENIE: NEC UP to kołnierz ortopedyczny, który pomaga utrzymać neutralne ułożenie kręgosłupa szyjnego. Jego stosowanie zmniejsza ryzyko paraliżu i dalszych uszkodzeń kręgosłupa u pacjentów po urazach podczas transportu.

OPIS PRODUKTU: Jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny NEC UP jest dostępny w dwóch wersjach: dla dorosłych i dla dzieci. Jest regulowany, dzięki czemu można go dopasować do różnych rozmiarów, zapewniając bezpieczne dopasowanie. Wykonany ze sztywnego polietylenu z wyściółką z pianki PE, NEC UP można łatwo myć i dezynfekować, co czyni go praktycznym wyborem do wielokrotnego użytku.

DANE TECHNICZNE

Kody	QC19101	QC19100
Rozmiar	Pediatryczny	Dla dorosłych
Regulowana wysokość podbródka	Niemowlęta 6 cm Dzieci 7 cm Petite 8 cm	Niski 10,5 cm Short 11,5 cm Regular 12,5 cm Tall 13,5 cm
Obwód	46,5 cm	57,5 cm
Waga	85 g	120 g
Materiał	PE	PE

JAK KORZYSTAĆ Z NEC UP

WAŻNE: RATOWNIK MUSI PRZEZ CAŁY CZAS UTRZYMYWAĆ KRĘGOSŁUP SZYJNY W POZYCJI NEUTRALNEJ, PODCZAS GDY DRUGI RATOWNIK ZAKŁADA KOŁNIERZ.



1 Należy zmierzyć odległość między punktem połączenia obojczyka a dolną krawędzią brody pacjenta. W tym celu przydatne może być urządzenie Spencer Spectar Sizer. Należy dobrać odpowiedni rozmiar kołnierza, porównując zmierzoną wartość z częścią kołnierza, która będzie przylegać do ramienia pacjenta.



2 Ustawić osłonę podbródka na odpowiedniej wysokości.



3 Należy wybrać rozmiar, który można łatwo zidentyfikować dzięki czerwonemu oznaczeniu widocznemu z przodu obroży.



4 Zabezpieczyć podbródek, naciskając oba zatrzaski oznaczone nadrukowanym słowem „Lock” na kołnierzu.



5 Zapiąć kołnierz za pomocą zapięcia na rzep, aby zapewnić prawidłowe unieruchomienie.

AKCESORIA

- Kod CT06006 – SPECTAR SIZER Długopis dotykowy do określenia odpowiedniego rozmiaru obroży.

Wersja 1 (22.10.2024)

KOPIA

NIEZWERYFIKOWANA

©Prawa autorskie – Niniejszy dokument jest własnością firmy SPENCER ITALIA SRL i nie może być powielany, wykorzystywany ani rozpowszechniany bez pisemnej zgody firmy SPENCER ITALIA SRL.