



Model 3B do pielęgnacji niemowląt

angielski

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy! Wybierając model 3B do pielęgnacji niemowląt, zdecydowaliście się Państwo na produkt wysokiej jakości. Aby utrzymać model 3B do pielęgnacji niemowląt w doskonałym stanie, mamy dla Państwa następujące wskazówki:

- Prosimy nie narażać modelu na długotrwałe działanie nadmiernych temperatur (np. bezpośrednie nasłonecznienie).
- W razie potrzeby model można wyczyścić łagodnym roztworem mydła. Uporczywe plamy, z wyjątkiem pomalowanych obszarów głowy, można dodatkowo usunąć alkoholem czyszczącym. Nie należy jednak używać rozpuszczalników!
- Barwione roztwory, płyny dezynfekujące zawierające jod oraz użycie markerów (trwałych lub innych) mogą prowadzić do trwałego odbarwienia skóry.
- Aby jak najlepiej odzwierciedlić rzeczywistość wagę i wrażenia dotykowe, model 3B Baby Care jest wypełniony żelam. Podczas szkolenia nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby przebić skórę.
- Jeśli w dowolnym momencie konieczne będzie użycie środków poślizgowych, należy upewnić się, że są to wyłącznie środki rozpuszczalne w wodzie. Nie należy stosować środków poślizgowych na bazie tłuszczu lub oleju.

Model 3B Baby Care nadaje się wyłącznie do celów szkoleniowych wymienionych w niniejszej broszurze. Nie jest to zabawka dla dzieci.

W przypadku pytań lub reklamacji prosimy o podanie numeru seryjnego modelu 3B Baby Care, który znajduje się na podeszwie stopy.

Życzymy Państwu ciekawego i owocnego szkolenia z modelem 3B Baby Care!

Przy okazji – na **stronie www.3bscientific.com** zawsze znajdą Państwo najświeższe informacje dotyczące produktów i nowości firmy 3B.

Informacje ogólne

Rozmiar: 51 cm
Waga: 3 000 g
Obwód głowy: 33 cm
W zestawie z torbą transportową

angielski

Model 3B do pielęgnacji niemowląt

Model 3B Baby Care został opracowany w ścisłej współpracy z profesjonalistami z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego. Ten realistyczny model noworodka płci męskiej nadaje się do różnych procedur szkoleniowych:

Zmiana pieluchy

Można ćwiczyć wszystkie popularne techniki przewijania przy użyciu pieluch jednorazowych lub materiałowych. Nie należy stosować olejku dla niemowląt, kremu ani pudru.

Karmienie i podawanie leków

Można ćwiczyć ułożenie dziecka do karmienia piersią i butelką, a także podawanie leków za pomocą zakraplacza. W celu utrzymania czystości wewnętrznego połączenia z cewką moczową należy używać wyłącznie wody.

Pobieranie próbek moczu

Połączenie między ustami a cewką moczową pozwala na wydalanie podanego płynu po krótkim czasie. Aby zasymulować pobranie próbki moczu, można użyć standardowego worka do zbierania moczu.

Ubieranie i rozbieranie

Można ćwiczyć ubieranie i rozbieranie niemowlęcia przy użyciu standardowej odzieży dla noworodków.

Podnoszenie, noszenie i układanie niemowlęcia

Naturalna waga niemowlęcia oraz elastyczność rąk i nóg umożliwiają wykonywanie wszystkich ruchów niezbędnych do podnoszenia, noszenia i układania niemowlęcia.

Mycie oraz czyszczenie ust, oczu, uszu i nosa

Aby przećwiczyć prawidłowe ułożenie niemowlęcia podczas kąpieli, model 3B Baby Care można umieścić w ciepłej wodzie (maksymalnie do 40°C). Usta, oczy, uszy i nos można również oczyścić za pomocą gazika lub wacika. Możliwe jest również użycie specjalnej gruszki do czyszczenia nosa. Aby zademonstrować zapobieganie przedostawaniu się wody do ucha, płyty skóry przy wejściu do uszu można zamknąć, delikatnie naciskając kciukiem i palcem środkowym.

Pomiar temperatury w odbycie

Do symulacji pomiaru temperatury w odbycie można używać standardowych termometrów doodbytniczych.

Badanie ciemiączek i jąder

Miękka skóra głowy umożliwia badanie palpacyjne przedniego i tylnego ciemiączka. Można również przećwiczyć badanie palpacyjne jąder.





3BScientific

Międzynarodowa grupa przedsiębiorstw

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Niemcy Tel.: + 49
(0)40-73966-0 • Faks: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com